

デジタル耳垢耳鏡 耳かきカメラ 型番 (EAR-W1D)

2022年11月更新 K&Mサービス株式会社

ソフト・アプリが継続的に更新するため、説明書と一致しない場合があります、ご了承ください。

一、製品概要

デジタル耳垢耳鏡は、耳の狭いところなどの様子まで確認することができるビデオスコープ、LED搭載で明るく照らすことが可能、スマホ等で映像として表示させるタイプです。スマホで表示をするため複数人で確認ができることや、持ち運びができるハンディタイプ、スマートフォンなどと通信してリアルタイムで読み込めるなど、これまでの耳の狭いところで難しかったことが可能になってきています。




二、各部名称とセット内容



1. 電源ボタン 長押し 1 秒電源 ON、長押し 3 秒電源 OFF
2. インジケータ 青ランプ点滅：電源 ON 消灯：電源 OFF/充電完了/WIFI 接続して動作中
赤ランプ常時点灯：電源 OFF の状態で充電中 赤ランプ点滅：電源 ON の状態で充電中
3. カメラレンズ 6 つの LED 内蔵 電源 ON 点灯・電源 OFF 消灯
4. 用途別の交換用スティック 4 つ（本体に付けている分を含む）

三、操作・動作確認

スマホ用アプリは下記QRコードよりインストールしてください。
Appストアより「YOBCAM」で検索して、インストール頂けます。

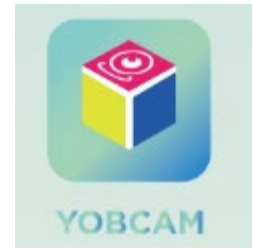

Android用アプリ



IOS用アプリ

アプリを起動して、WIFIを設定します。
アプリに戻して、カメラが映されます。とても簡単です。

※警告など出ましたら、許可してください。



ホーム画面

設定画面へ

WIFI選択

リアルタイム画面

- 1, WIFI設置画面へ、WIFI設定済みの場合リアルタイム画面へ
- 2, 撮影・録画したファイルの保存場所
- 3, アプリのバージョン
- 4, 前に戻る
- 5, メニューアイコンをす・表示するボタン
- 6, 本製品電池残量マーク
- 7, 撮影・録画したファイルの保存場所
- 8, 左耳・右耳の切替ボタン
- 9, 写真撮影
- 10, 動画録画
- 11, 全画面横・縦の切替ボタン

四、スペック

商品名： デジタル耳垢耳鏡
サイズ： 143*13MM
解像度： 640*480
内蔵光源： LEDライト6つ
バッテリー： 150mAh
充電時間： 約1.5時間
使用時間： 約1時間

五、注意事項

- ・加工、取扱ミスの場合は、いかなる理由でも返品・交換はできかねます。
 - ・弊社はいかなる場合も以下に関して一切の責任を負わないものとします。
 - ・免責について
- ① 本商品に関連して直接または間接に発生した、偶発的、特殊、または結果的損害・被害
 - ② お客様の誤使用や不注意による障害または本商品の破損など
 - ③ お客様による本商品の分解、修理または改造が行われた場合
 - ④ 本商品の不具合を含む何らかの理由により、映像が表示できないことによる不便・損害・被害
 - ⑤ 第三者の機器などと組み合わせたシステムによる不具合、あるいはその結果被る不便・損害・被害

Pro Station 
Just do it for you